


EOLE™ 20 cm D'AIR SYST'AM® BY STRYKER®

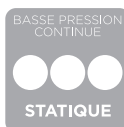

► DESCRIPTIF

Matelas thérapeutique Basse Pression Continue dynamique

► INDICATIONS

Catégorie d'indications 3• **Prévention : RISQUE ÉLEVÉ**

Patient non-levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

• **Aide au traitement :**

- avec adjonction(s) de système(s) de décharge et/ou de positionnement (plus de détails p. 56 / 57)
- possible également sans adjonction dans plusieurs cas (plus de détails p. 56 / 57) :
 - cas 1 : plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d'appui, patient incapable de se mobiliser seul et mauvais état général ou fin de vie.
 - cas 2 : plusieurs escarres de stade 3 et/ou 4 hors zone d'appui
 - cas 3 : une ou plusieurs escarres de stade 3 et/ou 4 en zone d'appui
 - cas 4 : pendant les 3 mois suivant une chirurgie d'escarre

► MODÈLE DISPONIBLE




EOLE™ 20 cm d'air

REF PSAC01

SAC DE TRANSPORT
DISPONIBLE

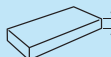

MODÈLE	REF			 min - MAX
Matelas EOLE™ 20 cm d'air avec sa housse intégrale technologie argent + unité de contrôle	2871000001	90 x 200 cm	20 cm	Pas de poids mini Poids max : 200 kg
Cellule seule orange	2871004001			
Cellule seule zone talons transparente	2871004002			
Housse partie supérieure technologie argent	2871002000			
Housse partie inférieure	2871003000			
Unité de contrôle pour EOLE™ 20 cm d'air	2871001000			
Gonfleur rapide universel	8PGU0001			
Sac de transport	PSAC01			

• Ce dispositif médical de Classe 2a est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



GARANTIE



NF EN ISO 597 - 1 & 2


Entretien
housses Ag²+

MATELAS À AIR DYNAMIQUE


- 20 cm d'air pour une immersion maximale du patient dans le support
- Composé de 20 cellules à double compartiment indépendantes, interchangeables et remplaçables fixées par boutons pression, dont 5 cellules talonnières différenciées.
- Matériau souple et résistant (nylon), conception longue durée.
- Mode transport : autonomie 6 h minimum. Le patient peut être déplacé (vers une autre chambre, au bloc...), tout en restant sur un support thérapeutique alors statique.
- 2 bandes centrales de maintien des cellules pneumatiques, reposant sur un support amovible.
- Désinfection simple et rapide du support.

BASSE PRESSION CONTINUE (BPC)

- Technologie visant à favoriser l'immersion « naturelle » du patient afin de maximiser la surface de portance et ainsi de répartir de façon plus harmonieuse les pressions d'interface sur l'ensemble de la surface corporelle, ce qui permet par là même de réduire les pressions exercées en regard des zones à risque d'escarre
- Efficacité reconnue, en préventif comme en curatif
- **Pas de poids minimum**
- Poids maximum : **200 kg**
- **100 % automatique.** Système auto-régulé, sécurité de traitement.

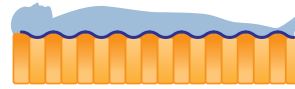BASSE PRESSION CONTINUE


- Immersion du patient et optimisation des points de portance.
- Pressions constatées : **9 à 32 mmHg.**
- **Pas de poids minimum.**

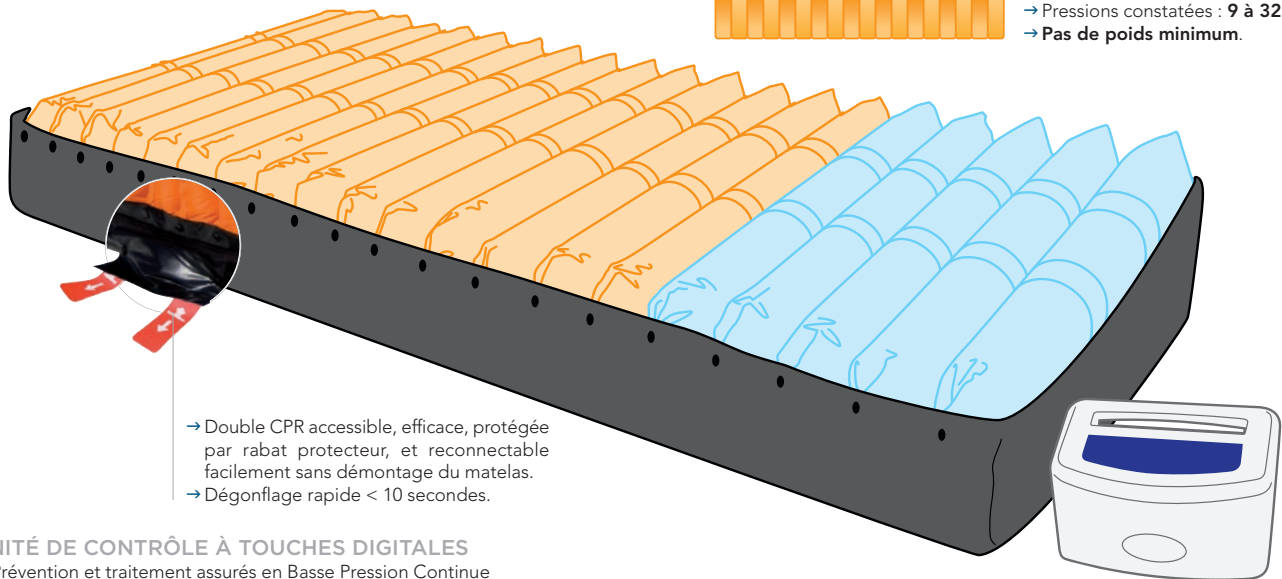

- Double CPR accessible, efficace, protégée par rabat protecteur, et reconnectable facilement sans démontage du matelas.
- Dégonflage rapide < 10 secondes.


UNITÉ DE CONTRÔLE À TOUCHES DIGITALES

- Prévention et traitement assurés en Basse Pression Continue
- Pas de poids minimum
- 2 modes d'utilisation possible : statique ou dynamique alterné
- **En mode dynamique, « micro-alternance » des points d'appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes**
- Mode soins se désactivant au bout de 15 minutes.
- Verrouillage clavier automatique au bout de 5 minutes.
- Mise en veille automatique du compresseur s'il n'est pas sollicité (mode statique)
- Réglage possible sans altérer le principe de Basse Pression Continue. Position « max » adaptée pour faciliter les soins, la toilette, et les transferts.
- Facilité d'utilisation : aucun risque de surgonflage
- Sécurité : présence d'alarmes visuelles et sonores (en cas de coupure électrique, de chute du patient, perte d'air...)
- Touche de verrouillage clavier
- Filtre anti-poussière interchangeable

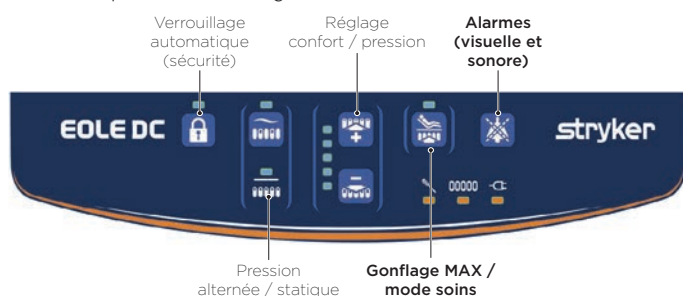**MATELAS POLYVALENT**

- Autorise de nombreuses configurations.
- Possibilité de créer une décharge totale sur une ou deux cellules (ex : zone talonnière) grâce aux deux bouchons fournis avec le matelas.
- Bouchons de remplacement également vendus à l'unité.

Réf. 2871004004

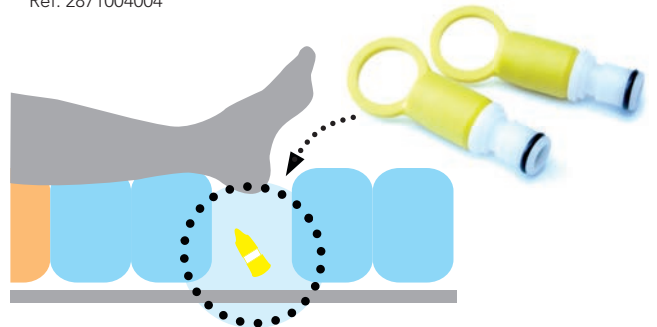**1 VERSION DE HOUSSE DISPONIBLE Plus d'infos p. 77****Housse intégrale technologie argent**

- Structure en 2 parties indépendantes.
- Enduction de Polyuréthane sur textile type jersey traité avec la technologie Argent Ag²⁺ : anti-bactérien (y compris MRSA) et anti-microbien.
- Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.



TECHNOLOGIE ARGENT



ANTIMICROBIEN



ANTIBACTÉRIEN

INSTALLATION FACILITÉE

- Fermeture de la housse par fermeture éclair facilitant le housage / déhousage.
- 6 sangles latérales de fixation du matelas au cadre fixe du lit.

