


TALONNIÈRE ENVELOPPANTE P901T



80 kg/m³
Mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée

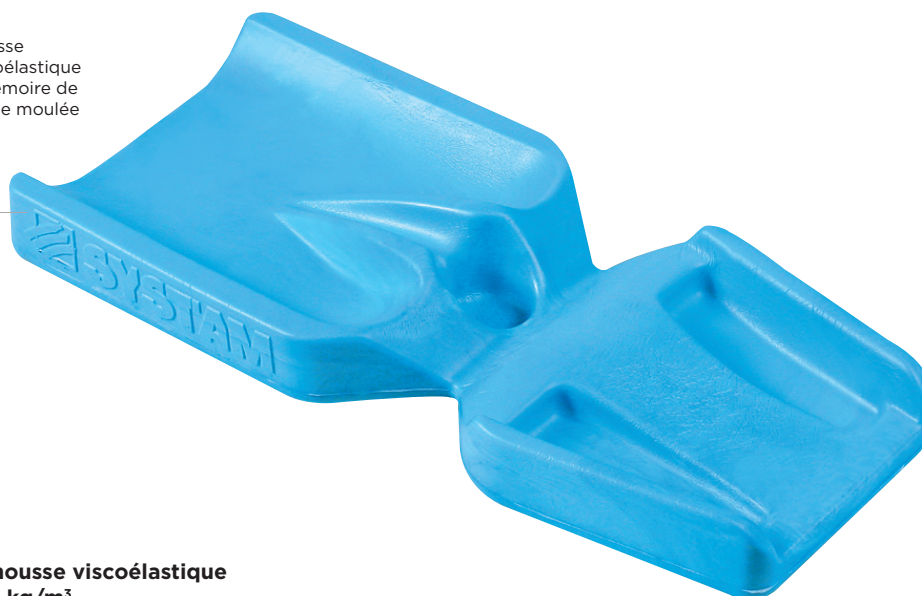

► DESCRIPTIF

Talonnère moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³

► INDICATIONS

Aide à la prévention des escarres talonnières pour les patients à risque faible à moyen, alités plus de 10 heures par jour, ayant une limitation de la mobilité des membres inférieurs associée à un facteur de risque spécifique de l'escarre talonnière :

- atteinte vasculaire ou neurologique des membres inférieurs (diabète et autres étiologies)
- agitation, confusion, absence de réponse, état de stupeur
- œdème d'un membre inférieur
- flessum du genou

Patients ayant une escarre talonnière de stade 1 ou 2, associée à une motricité involontaire incontrôlée des membres inférieurs (chorées, agitations, etc..) ne pouvant observer un dispositif de décharge complète de la zone talonnière.

Patients en cours de grabatisation

► MODÈLE DISPONIBLE



Talonnère enveloppante P901T

MODÈLE	REF	Longueur	Largeur	Hauteur
Talonnère enveloppante P901T (livrée avec housse)	P901TIHW	55 cm	25 cm	7,5 cm

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



GARANTIE 2 ANS



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Entretien housses POLYMAILLE®



PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :

- Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- Lutte contre les frictions et cisaillements.
- Souple et doux au toucher (confort).
- Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
- Lavables jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- Traitement d'ignifugation.
- En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.


→ Contrairement à la plupart des coussins se fixant à l'aide de sangles ou velcros s'avérant peu confortable à l'utilisation de par les frictions et irritations engendrées, les produits de la gamme positionnement SYST'AM® sont intégralement housés et dotés d'un système de fixation particulièrement confortable et aisé à régler :

- le système de fixation procure un maintien durable en position.
- dispositif facile à mettre en place pour l'aidant.



EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

→ Permet l'enfoncement du talon au sein de la matière, ce qui combiné au galbe du dispositif, procure un abaissement des pics de pressions en regard des zones à risque d'escarres.

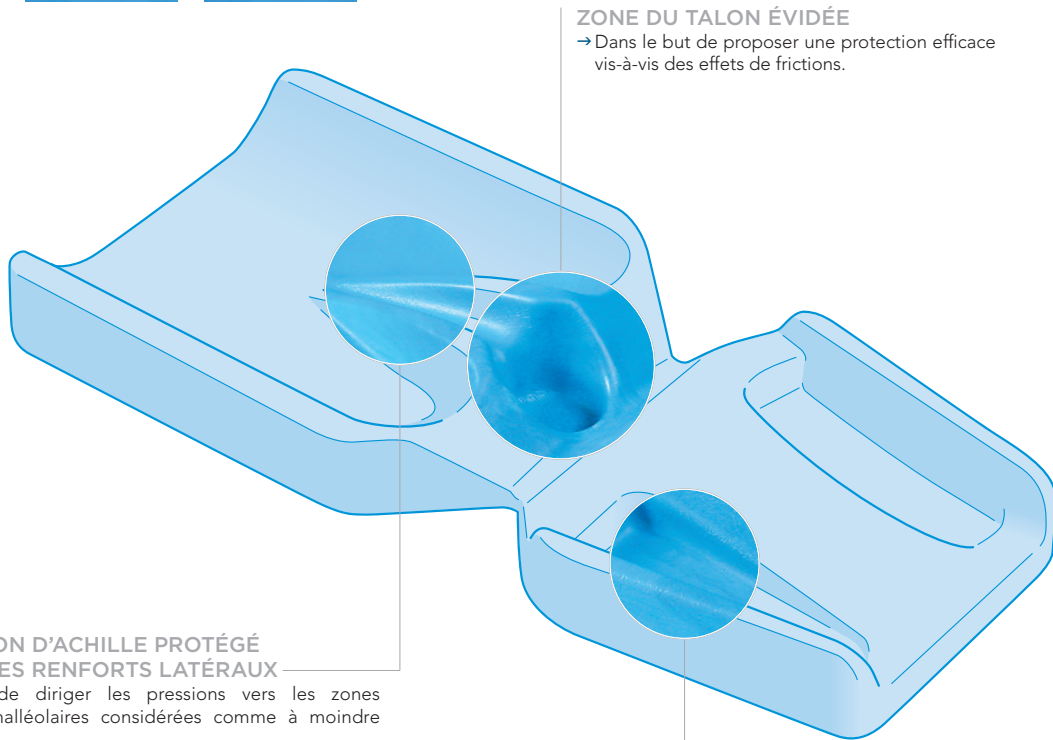

ZONE DU TALON ÉVIDÉE


→ Dans le but de proposer une protection efficace vis-à-vis des effets de frictions.

TENDON D'ACHILLE PROTÉGÉ PAR DES RENFORTS LATÉRAUX

→ Afin de diriger les pressions vers les zones rétromalléolaires considérées comme à moindre risque.

BORDS LATÉRAUX DE L'AVANT-PIED ÉVIDÉS

→ Pour reporter les points d'appuis vers les zones alentours à plus faible prévalence d'escarre.

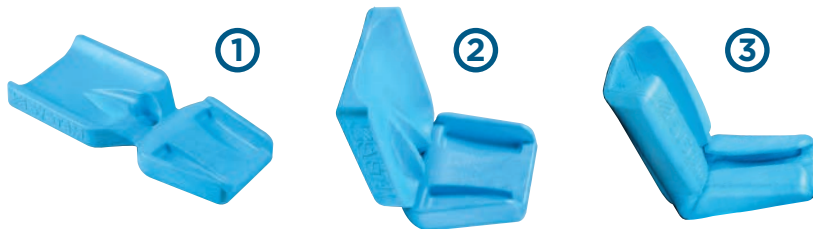

ENVELOPPANTE ET SOLIDAIRE DU PIED

→ Indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée, elle assure une diminution des effets de frictions engendrés, source d'escarres entre le couchage et le talon.
→ Tout à fait adaptée pour les sujets connaissant une agitation ou des mouvements permanents des membres inférieurs.

